



# Sengstaken Blakemore Sonde **TYP 42**

## KURZANLEITUNG

### Zur Akuttherapie von Ösophagusvarizenblutungen

Diese Kurzanleitung wurde auf Grundlage der umfangreichen Gebrauchsanweisung des Herstellers erstellt und ersetzt nicht das Original.

#### ANWENDUNG:

1. Vor Gebrauch das Gleitmittel in den dafür vorgesehenen seitlichen Port des Führungsmandrins applizieren. Dies erleichtert die Retraktion des Mandrins.
2. **Beide** Ballone nasal / oral in den Magen vorschieben.  
Bitte beachten Sie die Distanzmarkierungen auf der Sonde!  
Anschließend den Führungsmandrin einige Zentimeter herausziehen.
3. Befüllung des **>Gastric Balloon<** (roter Ansatz) mit **max. 300 ml Luft**.

#### **ACHTUNG!**

4. Danach erfolgt ein vorsichtiger Rückzug der Sonde mit **300 - 500g / 2,9 - 4,9N** bis leichter Widerstand zu spüren ist (Abb.1).
5. Anschließend erfolgt die Befüllung des **>Esophageal Balloon<** (schwarzer Ansatz) mit einem **empfohlenen Druck von 4,0 kPa / 30mmHG Luft** (max. 5,3 kPa / 40mmHG) unter Aufrechterhaltung des Rückzuges und Entfernung des Führungsmandrins.  
Zwölf Stunden nach Befüllung langsam entblocken und Blutungsstatus kontrollieren.  
Danach im Rhythmus von 4-6 Stunden wiederholen.




#### **ACHTUNG: Eine radiologische Lagekontrolle wird empfohlen!**

6. **Aufgrund der hohen Luftdurchlässigkeit von Silikon sind die Balloninnendrucke des >Gastric Balloon<, sowie des >Esophageal Balloon< zwingend und dauerhaft mit Cuffdruckmessern zu kontrollieren (s. Manometer- Anschlüsse)!**  
Hierzu bieten wir das Cuffdruck-Messgerät mit der Art.-Nr.: 55-13-500 an.




# STEP-BY-STEP ANWENDUNG

## TYP 42

zur Akuttherapie von  
Ösophagusvarizenblutungen

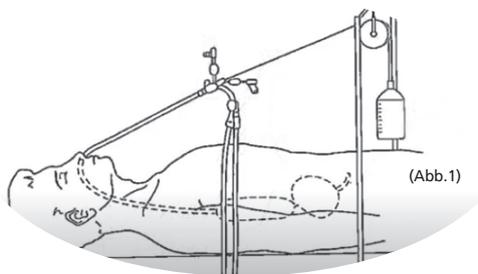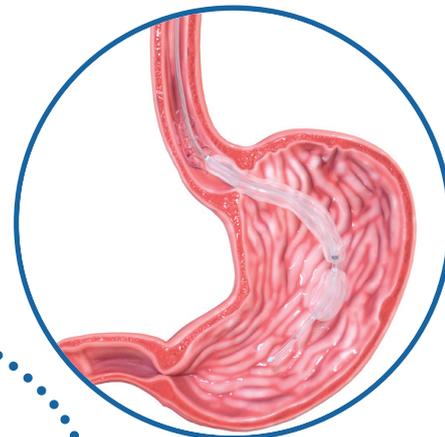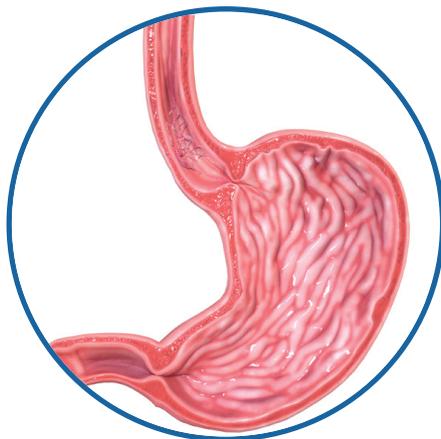

max. 500 g Kontergewicht

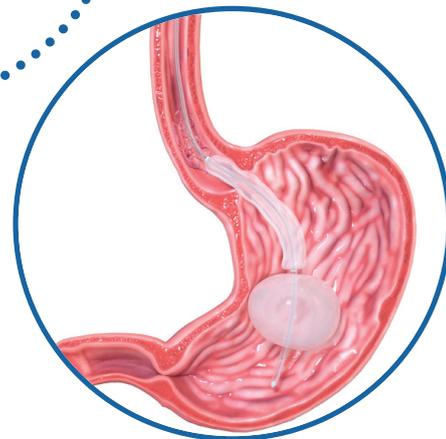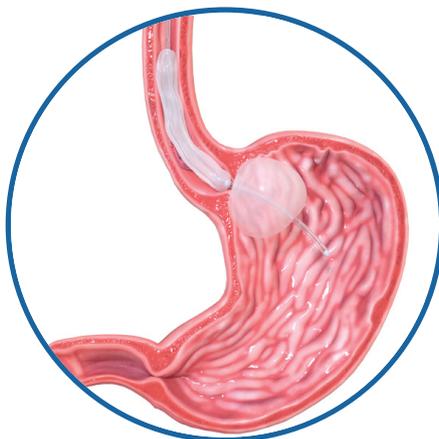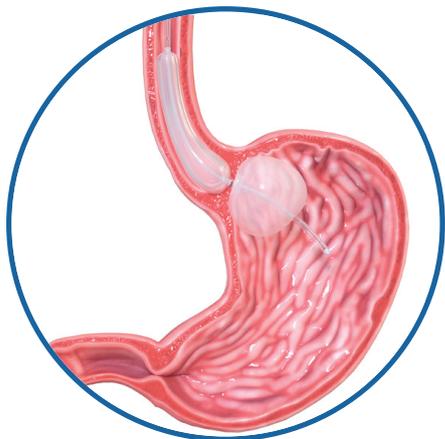

AP NENNO Medizintechnik GmbH  
Havellandstraße 10 • 45770 Marl  
Tel.: 02365 56008 • Fax: 02365 56102  
E-Mail: [info@ap-nenno.de](mailto:info@ap-nenno.de)  
Internet: [www.ap-nenno.de](http://www.ap-nenno.de)

Hersteller  
Dalian Create Medic Co., Ltd.  
IIB-31 Dalian 11880  
China

EU Bevollmächtigter  
MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30715 Hannover

**nenno**  
medical products