



Sengstaken Blakemore Sonde **TYP 42**

KURZANLEITUNG

Zur Akuttherapie von Ösophagusvarizenblutungen

Diese Kurzanleitung wurde auf Grundlage der umfangreichen Gebrauchsanweisung des Herstellers erstellt und ersetzt nicht das Original.

ANWENDUNG:

1. Vor Gebrauch ein handelsübliches, ölhaltiges Gleitmittel in den dafür vorgesehenen seitlichen Port des Führungsmandrins applizieren (10 ml Spritze). Der lose Mandrin ist vorher fest zu konnektieren. Durch die Applikation eines Gleitmittels erleichtert sich die Retraktion des Mandrins.
2. **Beide** Ballone nasal / oral in den Magen vorschieben.
Bitte beachten Sie die Distanzmarkierungen auf der Sonde!
Anschließend den Führungsmandrin einige Zentimeter herausziehen.
3. Befüllung des **>Gastric Balloon<** (roter Ansatz) mit **max. 300 ml Luft**.

ACHTUNG!

4. Danach erfolgt ein vorsichtiger Rückzug der Sonde mit **300 - 500g / 2,9 - 4,9N** bis leichter Widerstand zu spüren ist (Abb.1).
5. Anschließend erfolgt die Befüllung des **>Esophageal Balloon<** (schwarzer Ansatz) mit einem **empfohlenen Druck von 4,0 kPa / 30mmHG Luft** (max. 5,3 kPa / 40mmHG oder 54,38 cmH₂O) unter Aufrechterhaltung des Rückzuges und Entfernung des Führungsmandrins. Zwölf Stunden nach Befüllung langsam entblocken und Blutungsstatus kontrollieren. Danach im Rhythmus von 4 - 6 Stunden wiederholen.




ACHTUNG: Eine radiologische Lagekontrolle wird empfohlen!

6. **Aufgrund der hohen Luftdurchlässigkeit von Silikon sind die Balloninnendrucke des >Gastric Balloon<, sowie des >Esophageal Balloon< zwingend und dauerhaft mit Cuffdruckmessern zu kontrollieren (s. Manometer- Anschlüsse)!**
Hierzu bieten wir das Cuffdruck-Messgerät mit der Art.-Nr.: 55-13-500 an.




STEP-BY-STEP ANWENDUNG

TYP 42

zur Akuttherapie von
Ösophagusvarizenblutungen

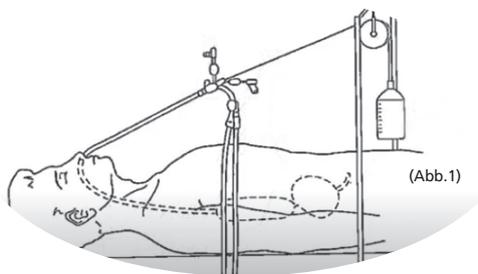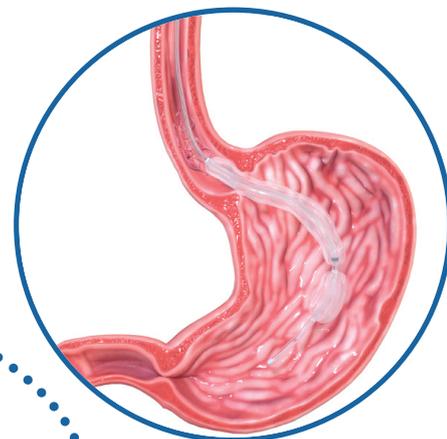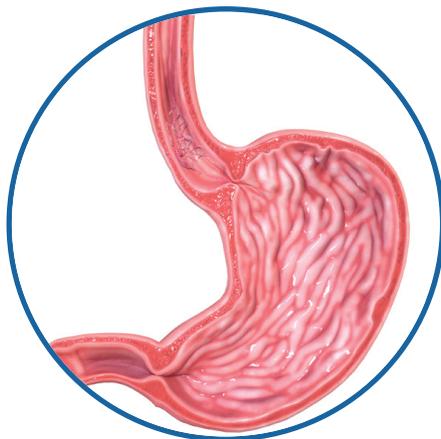

max. 500 g Kontergewicht

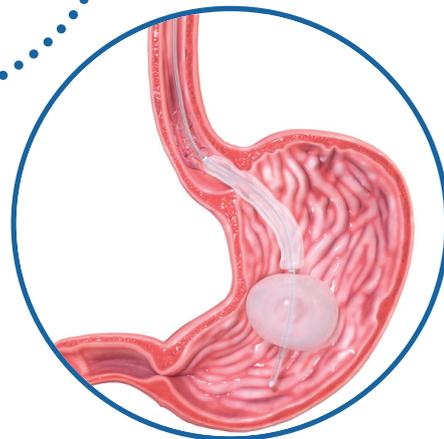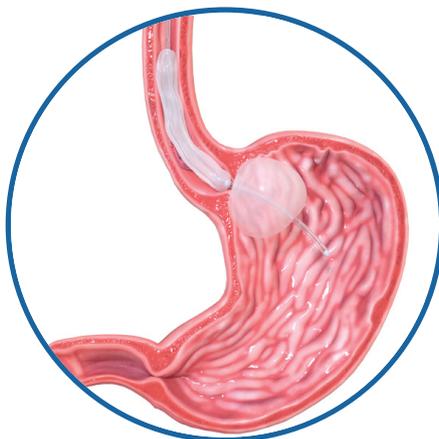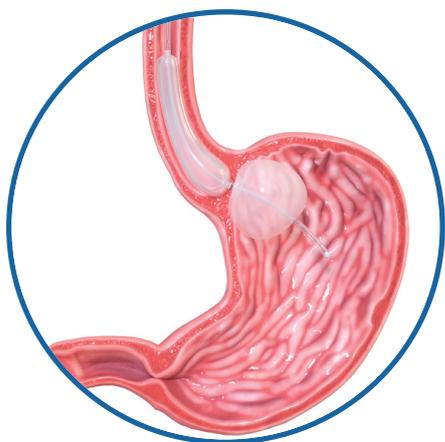

AP NENNO Medizintechnik GmbH
Havellandstraße 10 • 45770 Marl
Tel.: 02365 56008 • Fax: 02365 56102
E-Mail: info@ap-nenno.de
Internet: www.ap-nenno.de

Hersteller
Dalian Create Medic Co., Ltd.
IIB-31 Dalian 11880
China

EU Bevollmächtigter
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30715 Hannover

nenno
medical products