

KURZANLEITUNG

Zur Akuttherapie von Fundusvarizenblutungen

Diese Kurzanleitung wurde auf Grundlage der umfangreichen Gebrauchsanweisung des Herstellers erstellt und ersetzt nicht das Original.

ANWENDUNG:

1. Vor Gebrauch ein handelsübliches, ölhaltiges Gleitmittel in den dafür vorgesehenen seitlichen Port des Führungsmandrins applizieren (10 ml Spritze). Der lose Mandrin ist vorher fest zu kontaktieren. Durch die Applikation eines Gleitmittels erleichtert sich die Retraktion des Mandrins.
2. **Alle** Ballone nasal / oral in den Magen vorschieben.
Bitte beachten Sie die Distanzmarkierungen auf der Sonde!
Anschließend den Führungsmandrin einige Zentimeter herausziehen.
3. Den kleinen **>Fixing Balloon<** (blauer Ansatz) zuerst mit **60 ml sterilem Aqua dest.** füllen. (10ml Luer-Spritze)
4. Befüllung des **>Gastric Balloon<** (roter Ansatz) mit **400 ml Luft**.
Danach erfolgt ein vorsichtiger Rückzug der Sonde mit **300 – 500g / 2,9 – 4,9N** bis leichter Widerstand zu spüren ist. Der jetzt entstandene Innendruck muss mit einem Cuffdruckmesser permanent aufrechterhalten werden.
5. Anschließend erfolgt die Befüllung des **>Esophageal Balloon<** (schwarzer Ansatz) mit einem **empfohlenen Druck von 30mmHG Luft / 4.0 kPa** (max. 40mmHG oder 54,38 cmH₂O / 5.3 kPa) unter Aufrechterhaltung des Rückzuges und Entfernung des Führungsmandrins.
6. Zwölf Stunden nach Einlage der Sonde den Innendruck des **>Gastric Balloon<** langsam verringern und den Blutungsstatus kontrollieren und evtl. wieder Befüllung vornehmen (s. Punkt 4) und im Intervall von 4 - 6 Stunden wiederholen.



ACHTUNG: Eine radiologische Lagekontrolle wird empfohlen!

7. **Aufgrund der hohen Luftdurchlässigkeit von Silikon sind die Balloninnendrucke des >Gastric Balloon<, sowie des >Esophageal Balloon< zwingend und dauerhaft mit Cuffdruckmessern zu kontrollieren (s. Manometer-Anschlüsse)!**
Hierzu bieten wir das Cuffdruck-Messgerät mit der Art.-Nr.: 54-07-000 an.




STEP-BY-STEP ANWENDUNG

TYP 53

zur Akuttherapie von
Fundusvarizenblutungen
(ehemals Linton-Nachlas)

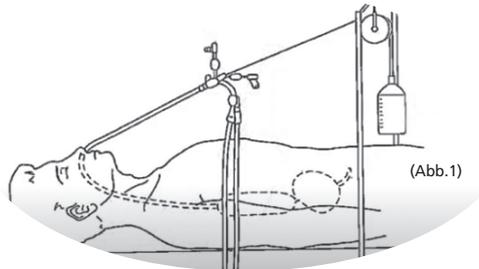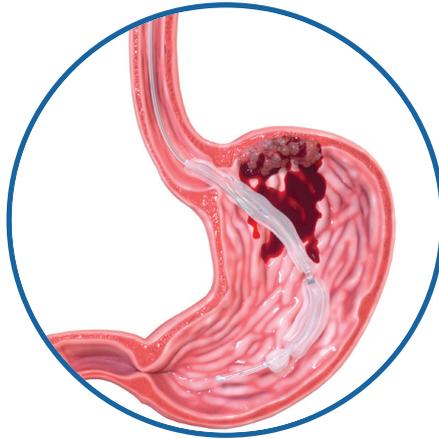

max. 500 g Kontergewicht

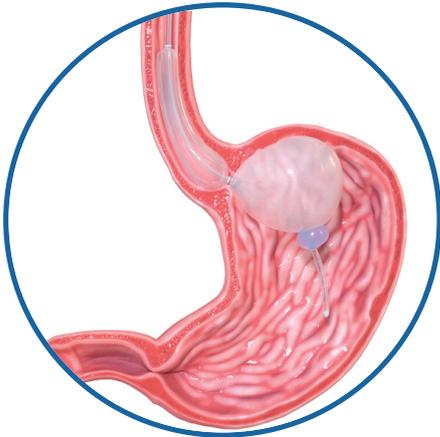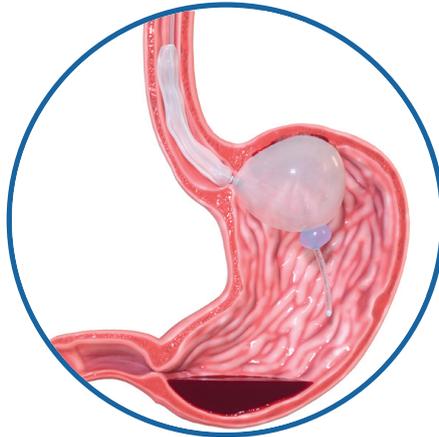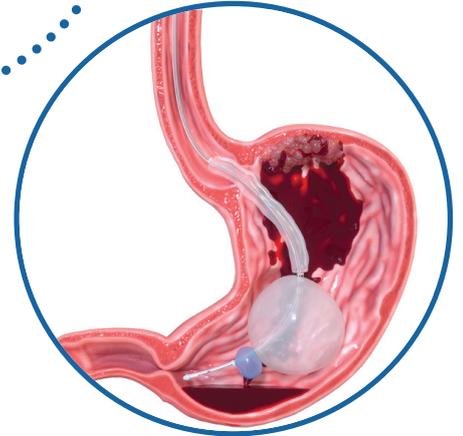

AP NENNO Medizintechnik GmbH
Havellandstraße 10 • 45770 Marl
Tel.: 02365 56008 • Fax: 02365 56102
E-Mail: info@ap-nenno.de
Internet: www.ap-nenno.de

Hersteller
Dalian Create Medic Co., Ltd.
IIB-31 Dalian 11880
China

EU Bevollmächtigter
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30715 Hannover

nenno
medical products